

NAVODILA ZA UPORABO OSEBNE VAROVALNE OPREME

dermagel® coated

RD10006001-05

Spodnja navodila se uporabljajo skupaj s podrobnimi informacijami na ovojnini.

Kratek opis izdelka

Preiskovalne in zaščitne rokavice iz lateksa, brez smukca, za enkratno uporabo, nesterilne.

Podroben opis izdelka

Referenčna številka	: RD10006001-05
Surovina	: naravni lateks iz kavčuka
Manšeta	: zavita
Barva	: kremna
Oblika	: za obe roki, za namestitev na desno in levo dlan
Velikosti	: XS (5–6), S (6–7), M (7–8), L (8–9), XL (9–10)
Količina v ovojnini	: 100 kosov, glede na težo
Rok uporabnosti	: 3 do 5 let odvisno od LOT številke (poglejte embalažo)

Navodila za shranjevanje

Rokavice je priporočljivo hraniti v suhem prostoru, pri temperaturi 5–35 °C in jih zaščititi pred neposredno sončno svetlobo.

Rokavice hranite na razdalji najmanj 1 m od ogrevalnih naprav, virov ognja in ozona.

Ne hranite jih v neposredni bližini topil, olj, goriv in maziv.

Stik z živili

Rokavice so označene s simbolom za stik z živili  in so skladne z zahtevami Uredbe (EU) št. 10/2011, Uredbe (ES) št. 1935/2004 in Uredbe (ES) št. 2023/2006 o dobri proizvodni praksi. Rokavice so primerne za ravnanje z živili, razen s kislimi živili in so bile testirane na splošen migracijski preizkus skladno s standardom EN 1186:

Pogoji ekstrakcije (trajanje preizkusa: dve uri pri 40 °C)	Rezultati analize [mg/dm²]	Rezultat preizkusa (mejna vrednost:
ocetna kislina, 3 %	49,5	ni opravljeno
etanol, 10 %	3,2	opravljeno
olivno olje	Ni bilo zaznano (< 3,0)	opravljeno

Razvrstitev in skladnost MDR

Rokavice so razvrščene v razred I skladno s Prilogo VIII Uredbe (EU) 2017/745 in ustrezajo standardom:

EN 455-1:2020, EN 455-2:2015, EN 455-4:2015, EN 455-3:2015, EN ISO 15223-1:2021, EN 1041:2008+A1:2013.

Stopnje prepustnosti po standardu EN ISO 374-1:2016

• 1. stopnja: > 10 min • 2. stopnja: > 30 min • 3. stopnja: > 60 min • 4. stopnja: > 120 min • 5. stopnja: > 240 min • 6. stopnja: > 480 min

Rezultati preizkusa skladno s standardom EN 16523-1:2015+A1:2018			Rezultati preizkusa skladno s standardom EN 16523-1:2015+A1:2018		
Kemikalija	Raven	EN 374-4:2013, degradacija [%]	Kemikalija	Raven	EN 374-4:2013, degradacija [%]
metanol, 1,5 %	6	6,1	žveplove kisline, 50 %	6	-22,1
ocetna kislina, 10 %	1	-1,4	etidijev bromid, 5 %	6	-24,7
benzalkonijev klorid*, 50 %	2	-10,7	vodikov peroksid, 3 %	6	-2,6
klorheksidinijev diglukonat**, 4 %	6	-13,1	vodikov peroksid (P), 30 %	2	4,3
fosforna kislina, 10 %	6	-18,4	formaldehid (T), 37 %	5	-23,6
natrijev hidroksid (K), 40 %	4	-59,2	glutaraldehid, 5 %	6	-8,9
natrijev hipoklorit, 12 %	6	-25,4	fenol, 0,1 %	6	-32,7

* Najmanjša zaznavna stopnja prepustnosti: 5 µg/cm²/min.

** Najmanjša zaznavna stopnja prepustnosti: 7 µg/cm²/min.

EN 374-4:2013 – Stopnje degradacije kažejo na spremembo pri odpornosti rokavic proti predrtju po izpostavljenosti preizkusni kemikaliji.

Preizkus skladno s standardom EN 374-2:2019 – raven 2 (ISO 2859)		Preizkus skladno s standardom EN ISO 374-5:2016	
stopnja učinkovitosti	AQL	zaščita pred bakterijami in glivami	opravljeno
raven 3	< 0,65	zaščita pred virusi	opravljeno
raven 2	< 1,5	EN ISO 374-5:2016 Odpornost proti prodiranju je bila ocenjena v laboratorijskih pogojih in se nanaša samo na preskušani vzorec	
raven 1	< 4,0		

Razlaga simbolov na ovojnin



Medicinski pripomoček



Osebnna varovalna oprema



Proizvaj

KAKO SI NADETI ROKAVICE?



KAKO SNETI ROKAVICE?

